



## 各部の名称と機能

側面

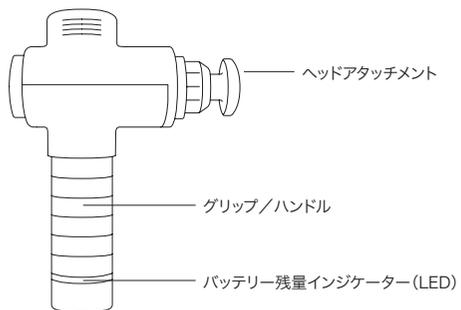

背面

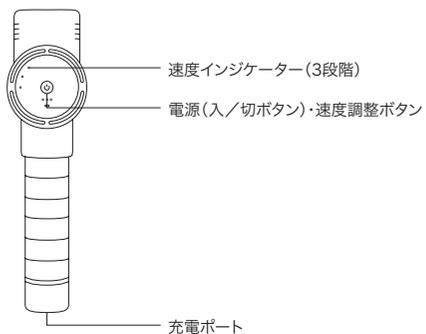

## 注意事項

### 安全にお使いいただくために

- 身体のケア以外の目的で使用しないでください。
- 次の部位には使用しないでください。  
頭部/顔/耳/首の前方/怪我をしている部位/手術をした部位/皮膚の下に金属、樹脂等を埋め込んでいる部位/皮膚トラブルのある部位/痛覚、知覚障害を起している部位/骨部位/関節部位/陰部
- 首の周辺に使用するときには特に注意し、首の前方には使用しないでください。
- アクセサリーなど硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。
- 製品の稼働時、アタッチメント部や製品の可動部に指などでむやみに触れないでください。

**FI Hyperice**

【販売元】 アルコインターナショナル株式会社  
〒542-0081  
大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F



hypericejp.com

# Let's get started



## ご使用前に


### Hypericeアプリをダウンロード

Hyperice Appと製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら製品を楽しむことができます。また、日々のアクティビティデータを組み合わせて、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することができます。



### 本体を充電する


付属の充電コードを本体の充電ポートに差し込み、本体を充電してください。バッテリーが満充電になるまで、最大4時間充電してください。  
※充電中の製品のご使用はお控えください。製品の劣化につながります。

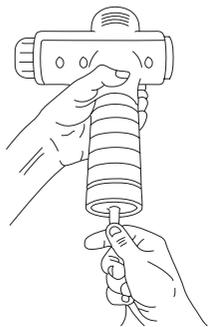

## ご使用方法

### 1.ヘッドアタッチメントを本体に取り付ける

お好みのヘッドアタッチメントを本体のアタッチメント差し込み口にまっすぐ差し込んでください。しっかりとまるまで強く押し込んでください。

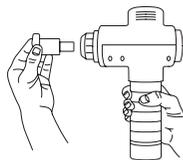

### 2.電源をつける

電源/速度調整ボタンを押して、本体の電源を入れます。  
バッテリー残量インジケータ(LED)が点灯するまで2秒間押し続け、手を離します。



### 3.圧力センサーを起動する

電源/速度設定ボタンを1回押して、圧力センサーを起動します。  
これで本体の使用準備は完了です。


### 4.速度を調整する

電源/速度調整ボタンを1回押すごとに速度が1レベル上がります。  
背面の白い点灯の数が現在の振動速度のレベルを示しています。



### 5.充電する

充電残量に応じてハンドルのLEDの色が緑→黄色→橙色→赤色に順に変化します。  
充電中は点滅しますが、満充電になると緑色に点灯します。  
※必ず付属のHypervolt 2専用の充電コードで充電してください。  
※1時間以上の連続使用はお控えいただき、1時間使用後は本体を30分以上休ませてください。

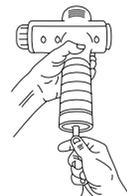

### 6.お手入れ

電源を切った状態で充電状態ではないことを確認の上、湿らせた清潔な布で本体をやさしく拭いてください。  
使用しないときは、直射日光と高温多湿な場所を避けて保管してください。

