


ご使用方法


4.時間を調整する

時間調整ボタンを1度押すごとに、連続稼働時間が15分増加します。ボタンに隣接するディスプレイに表示される数字は、現在の連続稼働時間を示します。調整できたら、開始ボタンを押してセッションを開始します。

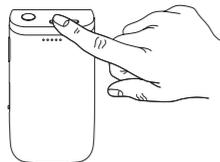


5.充電する

バッテリー残量インジケータが5本すべて点灯している状態が満充電を示しています。

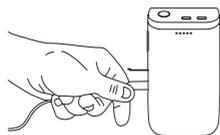

6.お手入れ


電源を切った状態で充電状態ではないことを確認の上、湿らせた清潔な布でデバイスをやさしく拭いてください。使用しないときは、直射日光と高温多湿な場所を避けて保管してください。

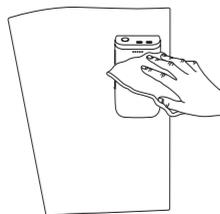

HyperSync™テクノロジー


ペアリングを行う

1. 左右両方のコントロールユニットの電源(入/切)ボタンを長押しして電源をいれてください。
2. 左右どちらかのコントロールユニットの開始/停止ボタンを長押しし、ディスプレイに「Pairing!」という文字が表示されることを確認してください。
3. もう片方のコントロールユニットの開始/停止ボタンを長押しし、ディスプレイに「Pairing!」という文字が表示されることを確認してください。ペアリングが完了するとHyperSync™ペアリングインジケータが点灯します。

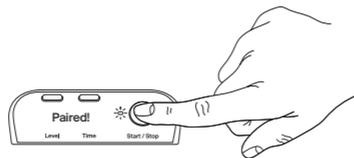

ペアリングを解除する

接続を解除するには、左右どちらかのコントロールユニットの開始/停止ボタンを長押ししてください。ディスプレイに「Unpaired!」と表示され、HyperSync™ペアリングインジケータが消灯したことを確認してください。

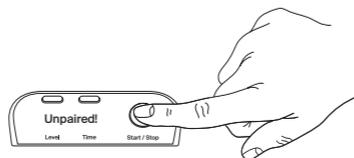

注意事項

安全にお使いいただくために

使用中にひどい痛みを感じたり気分が悪くなった場合、緊急時にアタッチメントを取り外されたい場合は次の手順に従ってください。

- 電源ボタンを押して、コントロールユニットを停止します。
- 肢部からアタッチメントを取り外します。
- 必要に応じて、医療機関に速やかに相談してください。

FI Hyperice

【販売元】アルコインターナショナル株式会社
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F





hypericejp.com

Let's get started



各部の名称と機能

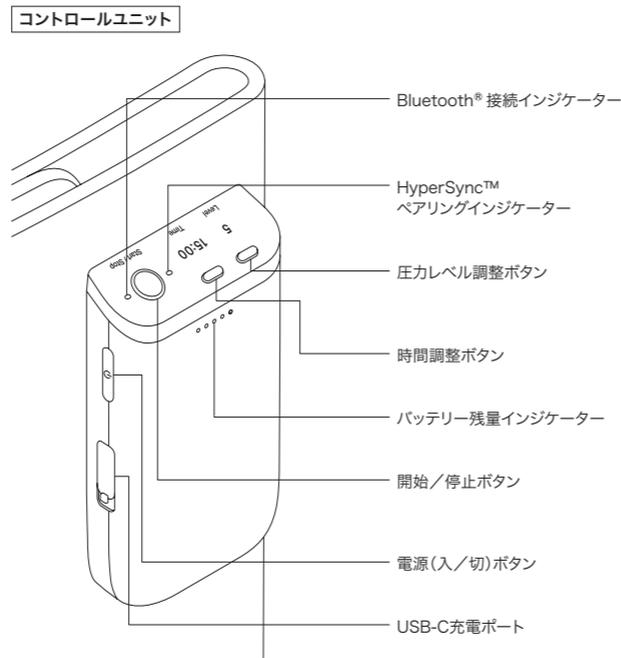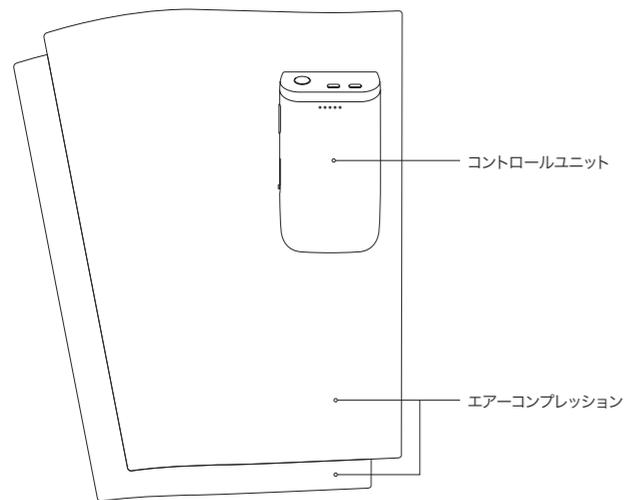

ご使用前に


Hypericeアプリをダウンロード

Bluetooth® 経由でNormatec Lower Legsの本体とHypericeアプリを接続することで、加圧レベルやタイマーをご自身の携帯から調整することができます。アプリを開くと自動でBluetooth® 接続され、インジケータで接続状況を確認することができます。



本体を充電する

付属の充電器をコントロールユニットに差し込み、本体を充電してください。バッテリーが満充電になるまで、最大4時間充電してください。
※充電中の製品のご使用はお控えください。製品の劣化につながります。

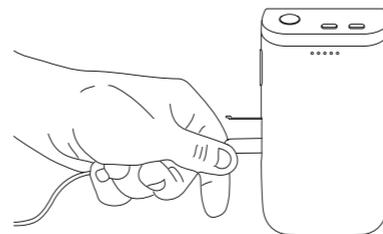

ご使用方法


1. 足に装着する

Normatec Lower Legsは素肌の上からでも服の上からでも装着可能です。アタッチメントが脛のあたりにくるように取り付けてください。強く締め付けすぎないように気を付けてください。



2. 電源をつける

コントロールユニットの電源(入/切)ボタンをディスプレイとバッテリー残量インジケータが点灯するまで、1秒ほど押し続けてください。

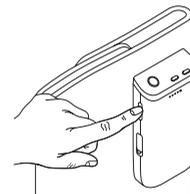

3. 圧力レベルを調整する

圧力調整レベルボタンを1度押すことに、レベルが1つ上がります。ご希望の圧力レベルになるように調整してください。ボタンに隣接するディスプレイに表示される数字は、現在の加圧レベルを示します。

